

別紙

1. 形状及び概寸

去勢台本体 概寸：190×135×40mm



去勢台ホルダー 概寸：450×140×70mm



去勢台本体に去勢台ホルダーを差し込み、次の写真のように組み合わせて使用する。



2. 原料及び材料

名称	原材料
去勢台本体	ステンレス ※
去勢台ホルダー	ステンレス

※ 動物又は薬剤と接触する部分

3. 使用方法

- ① 去勢台ホルダーで仕切板等を挟み、去勢台本体を取り付ける。
- ② 子豚を仰向けにし、頭から去勢台本体筒部に差し込み、後肢を前方に倒しながら後肢固定用バーを前方に倒して保定する。
- ③ 保定の解除は右側のハンドルを握って後肢固定用バーを手前に戻す。



4. 使用上の注意

後肢固定用バー及びハンドル部に子豚や手を挟まないように注意する。

5. 性能又は効能

子豚を保定することで暴れないため、作業者の怪我を防ぐことが期待できる。

6. 貯蔵方法

特になし

7. 有効期限

特になし